

PLUMA DE ADULTERACIÓN EN BEBIDAS

DRINKTEST

GHB (GAMMA-HIDROXIBUTIRATO)

KET (KETAMINA)

BZO (BENZODIACEPINAS)

Estas tres drogas tienen en común que alteran la conciencia, reducen la capacidad de reacción y memoria, y en algunos casos provocan inconsciencia, lo que explica por qué se usan de manera ilegal para adulterar bebidas (sumisión química).



DESCRIPCIÓN:

Prueba de adulteración de Bebidas BZO & KET & GHB. Proporciona referencia para la seguridad de tus bebidas.

• Prueba combinada 3 en 1 Detecta BZO (Gamma-Hidroxibutirato), KET (Ketamina) y GHB (Benzodiacepinas) en bebidas instantáneamente.

• Diseño todo en uno Excepcional facilidad de uso disminuye errores del usuario.

• Resultados rápidos en 3 minutos.


• Vida útil de 24 meses.

• Condiciones de almacenamiento 2-30°C.

- 1 Retire el tapón transparente de la pluma.
- 2 Sumerja la pluma en la muestra durante dos segundos.
- 3 Activando la prueba. Inserte la pluma en el activador. Resultados de GHB/BZO/KET en 3 minutos.



MODO DE USO

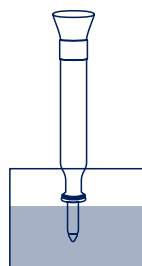

Sumerge por
2 segundos
en la bebida

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Para Tira GHB



Positivo



Negativo

Para Tira BZO/KET



Conmutador: 81 8040.2972

Diinsel S.A. de C.V. | Venezuela 342, Col. Vista Hermosa | Monterrey | 64620

Búscanos en



diinsel.com

