

TARJETA DE ADULTERACIÓN EN BEBIDAS

DRINKTEST

GHB (GAMMA-HIDROXIBUTIRATO)
KET (KETAMINA)

El GHB causa somnolencia y amnesia, y la Ketamina alucinaciones y pérdida de coordinación; ambas aumentan el riesgo de intoxicación grave al mezclarse con alcohol.



DESCRIPCIÓN:

El producto de prueba de adulteración de bebidas GHB & KET es una tarjeta de prueba visual para la detección rápida y cualitativa de GHB (Gamma-hidroxibutirato ácido) y KET (Ketamina) en bebidas. El área de prueba de GHB cambiará a azul cuando la concentración de GHB sea superior a 1 mg/mL, y el área de prueba de KET cambiará a naranja cuando la concentración de KET sea superior a 2 mg/mL. No consuma la bebida después de una prueba positiva.

•**Nota:** Que algunas sustancias, como los productos lácteos, pueden producir un falso positivo.

•Un resultado negativo de este producto no excluye la posibilidad de que otras sustancias peligrosas puedan estar presentes en la bebida. Además de GHB y KET, otras sustancias también pueden ser Drogas para Violaciones.

•Cada prueba solo puede usarse una vez.

•El color de las bebidas puede afectar la interpretación de los resultados.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

•Almacenado a 2-30°C hasta la fecha de caducidad indicada en la bolsa.

•No usar después de la fecha de caducidad.

•No congelar.

•Mantener alejado de la luz solar directa.

•Almacenar la zona de prueba en la bolsa/paquete, mantener dentro del paquete original.

PRECAUCIONES

•Piel y ojos intactos: Después de aplicar una gota del líquido sobre la zona de prueba con un dedo, el líquido restante en el dedo debe lavarse con agua o pañuelo. Si entra en contacto con los ojos, enjuague con abundante agua.

•Un resultado positivo indica la probabilidad de GHB o KET. Sin embargo, el resultado positivo también puede ocurrir en el caso de un falso positivo. Un resultado positivo no puede ser el único criterio para determinar la existencia de GHB o KET.

•Hay una probabilidad de que otras sustancias puedan estar en la bebida que no pueden ser probadas.

•La tira no debe servir nunca como única base para determinar la cantidad de drogas para violaciones.

•El azul y el naranja de una prueba positiva pueden tener diferentes matices, intensidades y mezclas.

•La prueba es para uso personal y para fines informativos únicamente.

•Nunca deje la bebida sin atender.

MODO DE USO



- 1 Abra la bolsa, retire la tira de prueba y úsela lo antes posible.
- 2 Aplique una gota de la bebida en el área de prueba.
- 3 Espere 10 segundos y compare el color del área de prueba con su borde exterior. Si el área de prueba de GHB cambia a azul, o el área de prueba de KET cambia a naranja, ¡NO BEBA!

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS



Conmutador: 81 8040.2972

Diinsel S.A. de C.V. | Venezuela 342, Col. Vista Hermosa | Monterrey | 64620

Búscanos en



diinsel.com

