



PRUEBA TOXICOLÓGICA EN SALIVA

PRUEBA RÁPIDA PARA DETECCIÓN DE DROGAS



Inmunoensayo visual rápido para la detección cualitativa de drogas en muestras de fluidos orales humanos. Dispositivo autónomo único por su método de detección. Realice las pruebas donde lo requiera.

Detecta sustancias toxicológicas simultáneamente

- | | | |
|-------------------|-----------------|------------------------------|
| » Alprazolam | » EDDP | » Opiáceos |
| » Anfetaminas | » Ketamina | » Oxidodona |
| » Barbitúricos | » Éxtasis | » Fenciclidina |
| » Buprenorfina | » Metanfetamina | » Propoxifeno |
| » Benzodiacepinas | » Morfina | » Marihuana |
| » Cocaína | » Metacualona | » Antidepresivos tricíclicos |
| » Cotinina | » Metadona | |

PRECAUCIONES

Leer detenidamente todo el procedimiento antes de realizar la prueba.

No usar después de la fecha de caducidad indicada en el producto. No usar la prueba si el sobre de aluminio está dañado. No reutilice las pruebas.


No coma, beba o fume en el área donde se van a manejar las muestras y los kits. Maneje todas las muestras como si tuvieran agentes infecciosos. Acate las precauciones establecidas contra los riesgos microbiológicos a lo largo del procedimiento y siga los procedimientos estándar para el desecho adecuado de las muestras.

La humedad y la temperatura pueden afectar los resultados.

Los donantes deben evitar colocar cualquier cosa (incluyendo alimentos, bebidas, goma de mascar y productos de tabaco) en la boca durante al menos 15 minutos antes de la recolección de muestra.

La muestra de fluido oral debe recolectarse mediante el colector suministrado con el kit. No se deben utilizar otros dispositivos de recolección con este ensayo.

MODO DE USO

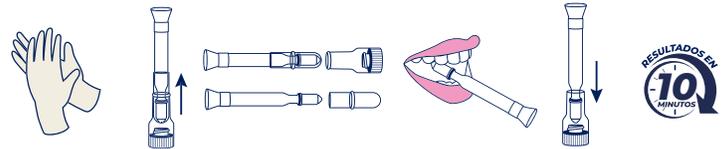


- 1 Sacar el dispositivo de prueba del tubo de extracción y retire el protector.
- 2 Mediante el hisopo de recolección proporcionado, haga que el donante barra dentro de la boca (mejilla, encías y lengua) varias veces durante 2 minutos.
- 3 Retire el hisopo de recolección de la boca. Coloque el dispositivo de prueba verticalmente en el tubo de extracción hasta que el borde del tubo de extracción alcance el centro del anillo de soporte.

NOTA: Al colocar el dispositivo de prueba verticalmente en el tubo de extracción, el borde del tubo de extracción debe alcanzar el centro del anillo de soporte. De lo contrario, esto puede provocar un fallo en el flujo lateral, lo que resultaría en un resultado incorrecto o inválido.

NEGATIVO



POSITIVO

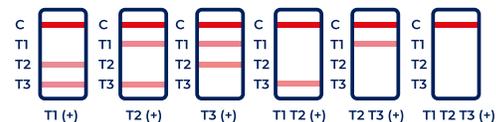

INVÁLIDO

