



## FRASCO SMALL CUP

### PRUEBA RÁPIDA PARA DETECCIÓN DE DROGAS

Registro Sanitario No. 0416R2017 SSA

Presentación Farmacia



Inmunoensayo cromatográfico para la detección cualitativa y simultánea de drogas, en una variedad de combinaciones en orina humana. Se basa en el principio de vinculación competitiva. Las drogas que puedan estar presentes en la muestra de orina compiten contra su conjugado de droga respectivo para sitios vinculantes en su anticuerpo específico.

Detecta sustancias toxicológicas simultáneamente  
**Combinación especial:**

- » **THC** Marihuana
- » **AMP** Anfetaminas
- » **BZO** Benzodiazepinas
- » **FYL** Fentanilo
- » **COC** Cocaína
- » **MET** Metanfetaminas
- » **TCA** Antidepresivos tricíclicos

### MODO DE USO



- 1 Deposite la muestra de orina en el frasco y ciérrelo.
- 2 Desprenda la etiqueta para conocer los resultados.
- 3 Interprete los resultados en 5 minutos.



### INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

