



DCHECK TIRAS

PRUEBA RÁPIDA PARA DETECCIÓN DE DROGAS


Registro Sanitario No. 0269R2017 SSA



Tiras reactivas para la detección cualitativa de drogas en orina humana. Las drogas identificadas químicamente (conjugados droga-proteína) compiten por los sitios vinculantes del anticuerpo limitado con las drogas que pueden estar presente en la orina.

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| » 7-Amino-Clonazepam | » Creatinina |
| » Acetaminofén | » Éxtasis |
| » Ácidos | » Fenciclidina |
| » Alcohol | » Fentanilo |
| » Anfetaminas | » Glucurónido de etilo |
| » Antidepresivo tricíclico | » Glutaraldehído |
| » Barbitúrico | » Grav. específica |
| » Benzodiazepina | » Hidromorfona |
| » Buprenorfina | » Ketamina |
| » Clonazepam | » Marihuana |
| » Cocaína | » Marihuana Sintética |
| » Mefedrona | » Nicotina |
| » Mescalina | » Nitrito / Glutaraldehído |
| » Metabolito de Metadona | » Opiáceos |
| » Metabolitos de heroína | » Oxidodona |
| » Metacualona | » Oxidantes |
| » Metadona | » Pregabalina |
| » Metanfetaminas | » Propoxifeno |
| » Metcatinona | » Tilidina |
| » Metilendioxipirovalerona | » Tramadol |
| » Metilfenidato | » Zaleplón |
| » Morfina | » Zolpidem |

MODO DE USO

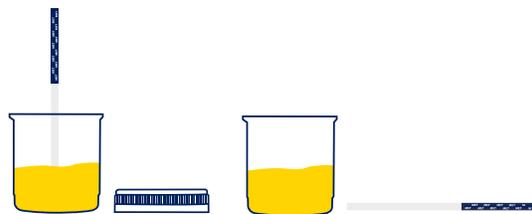


- 1 Sumerja la tira de prueba en la orina con la punta de la flecha apuntando hacia la orina. No sumerja la tira de prueba más allá de la línea de "Max Fill", como se indica con las flechas.
- 2 Remueva la tira después de 15 segundos y colóquela en posición horizontal en una superficie limpia y no absorbente.
- 3 Interprete los resultados en 5 minutos.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS



ÁREA DE MANEJO

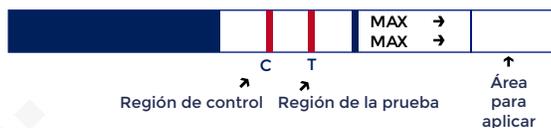

Conmutador: 81 8040.2972