

**DrugCheck®**

## DRUGCHECK FRASCO

### PRUEBA RÁPIDA PARA DETECCIÓN DE DROGAS

Registro Sanitario No. 1996R2013 SSA



Drug Check® Frasco es un inmunoanálisis de un solo paso diseñado para la detección cualitativa de múltiples drogas y sus metabolitos en orina humana, detección semicuantitativa del nivel de alcohol y detección de adulterantes en muestras de orina.

Puede adquirirse en diferentes combinaciones para detectar de 4 hasta 14 sustancias toxicológicas:

- |                   |                              |                  |
|-------------------|------------------------------|------------------|
| » Anfetaminas     | » Alcohol                    | » Marihuana      |
| » Barbitúricos    | » Fenciclidina               | » Metanfetaminas |
| » Benzodiazepinas | » Oxycodona                  | » Opiáceos       |
| » Cocaína         | » Metadona                   | » Fenciclidina   |
| » Buprenorfina    | » Antidepresivos tricíclicos | » Propoxifeno    |
| » Éxtasis         | » Adulterantes               |                  |

## CADENA DE CUSTODIA

El proceso que va desde la toma de la muestra que se analizará hasta la entrega de los resultados se denomina "cadena de custodia". El proceso inicia cuando la persona es nominada al examen y continúa con la orden médica, llena una ficha donde expresa su consentimiento para continuar con la toma de la muestra de orina. Una vez tomada, se vuelve a sellar en presencia de la persona. De ahí se va al laboratorio.

Los resultados se comunican al médico que emitió la orden o al responsable de la política preventiva en la empresa.

### Sello de seguridad

Etiqueta autoadherible que se coloca en la prueba para evitar manipulaciones.

### Bolsa de seguridad

Bolsa especial para el traslado de muestras positivas al laboratorio para confirmación de presunto positivo.

### Confirmación de positivo

Estudio por el cual se confirma el positivo de la muestra en nuestro laboratorio, certificando el resultado.



## MODO DE USO



- 1 Recoja la muestra de orina directamente en el frasco.
- 2 Retire la etiqueta después de 5 minutos
- 3 Interprete los resultados.

## INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

