

DrugCheck®

DIP DRUG TEST

PRUEBA DE DETECCIÓN TOXICOLÓGICA

Registro Sanitario No. 2034R2017 SSA




DrugCheck® Tarjeta es la prueba toxicológica ideal para propósitos de preempleo, postaccidente, pruebas al azar, aptitud para laborar y motivo de sospecha.

Para su mayor comodidad se puede adquirir en diferentes combinaciones, especificando qué tipo de sustancias desea detectar.

Detecta sustancias toxicológicas simultáneamente

- | | |
|----------------------------|------------------|
| » Adulterantes | » Barbitúrico |
| » Alcohol | » Benzodiacepina |
| » Anfetaminas | » Buprenorfina |
| » Antidepresivo tricíclico | » Cocaína |
| » Éxtasis | » Metanfetaminas |
| » Fenciclidina | » Opiáceos |
| » Marihuana | » Oxiconona |
| » Metadona | » Propoxifeno |

MODO DE USO

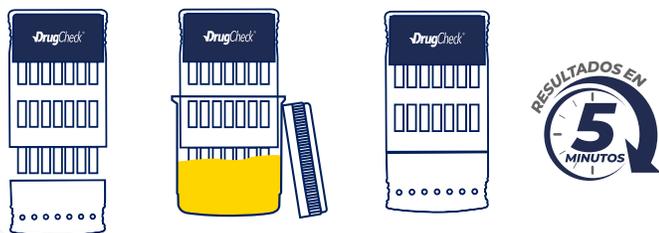

1 No rompa el empaque hasta que esté listo para empezar la prueba. Las tiras reactivas deben mantenerse a temperatura ambiente de 15° ~ 28° C antes de abrir la bolsa.

2 Abra la bolsa rompiendo en la ranura para retirar el dispositivo de prueba.

3 Retire la cubierta protectora y sumerja las tiras en la orina por lo menos 15 segundos, dependiendo del tiempo de migración de la orina. Las tarjetas Drug Check® vienen con una película protectora que permite sumergir la tarjeta, sin afectar su funcionamiento.

4 Coloque la cubierta protectora de nuevo sobre las tiras expuestas y ponga el dispositivo sobre una superficie limpia y plana.

5 Lea los resultados en 5 minutos.

IMPORTANTE: Para prevenir una lectura incorrecta, no interprete los resultados de la prueba después de 10 minutos.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

