

DrugCheck®

## TIRAS DE DROGAS

TIRA REACTIVA PARA DETERMINACIÓN DE DROGAS

Registro Sanitario No. 1175R2021 SSA




Tiras reactivas para la determinación individual en la orina humana de una de las siguientes drogas:


- » Anfetaminas
- » Antidepresivo tricíclico
- » Barbitúricos
- » Benzodicepinas
- » Buprenorfina
- » Cocaína
- » Fenciclidina
- » Marihuana
- » Metanfetamina
- » Opiáceos
- » Oxidodona
- » Propoxifeno

Las tiras de prueba se basan en el principio de reacción inmunoquímica entre un medicamento químicamente etiquetado (conjugado de proteína de droga) y la droga o los metabolitos de la droga que puedan estar presentes en la muestra de orina para los sitios de unión del anticuerpo limitado.

### ÁREA DE MANEJO

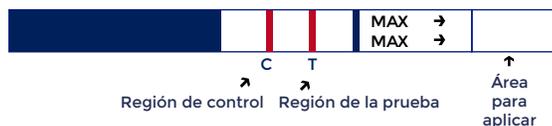

### MODO DE USO

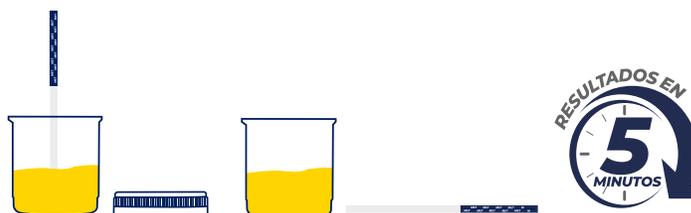

- 1 Sumerja la tira de prueba en la orina con la punta de la flecha apuntando hacia la orina. No sumerja la tira de prueba más allá de la línea de "Max Fill", como se indica con las flechas.
- 2 Remueva la tira después de 15 segundos y colóquela en posición horizontal en una superficie limpia y no absorbente.
- 3 Interprete los resultados en 5 minutos.

### INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

