

DrugCheck® DIP DRUG TEST CON TIRA DE ALCOHOL PRUEBA DE DETECCIÓN TOXICOLÓGICA

Registro Sanitario No. 2034R2017 SSA




DrugCheck® Tarjeta es la prueba toxicológica ideal para propósitos de preempleo, postaccidente, pruebas al azar, aptitud para laborar y motivo de sospecha.

Para su mayor comodidad se puede adquirir en diferentes combinaciones, especificando qué tipo de sustancias desea detectar.

Detecta sustancias toxicológicas simultáneamente

- | | |
|----------------------------|------------------|
| » Adulterantes | » Barbitúrico |
| » Alcohol | » Benzodiacepina |
| » Anfetaminas | » Buprenorfina |
| » Antidepresivo tricíclico | » Cocaína |
| » Éxtasis | » Metanfetaminas |
| » Fenciclidina | » Opiáceos |
| » Marihuana | » Oxiconona |
| » Metadona | » Propoxifeno |

MODO DE USO

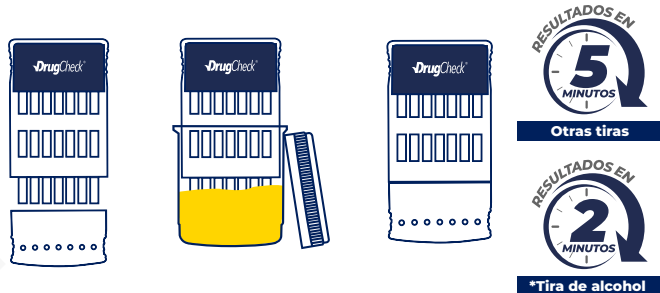

- No rompa el empaque hasta que esté listo para empezar la prueba. Las tiras reactivas deben mantenerse a temperatura ambiente de 15° ~ 28° C antes de abrir la bolsa.

- Abra la bolsa rompiendo en la ranura para retirar el dispositivo de prueba.
 - Retire la cubierta protectora y sumerja las tiras en la orina por lo menos 15 segundos, dependiendo del tiempo de migración de la orina. Las tarjetas Drug Check® vienen con una película protectora que permite sumergir la tarjeta, sin afectar su funcionamiento.
 - Coloque la cubierta protectora de nuevo sobre las tiras expuestas y ponga el dispositivo sobre una superficie limpia y plana.
 - Interprete los resultados en 2 minutos para la tira de alcohol y 5 minutos para el resto. No interprete los resultados después de este tiempo.
- IMPORTANTE:** Para prevenir una lectura incorrecta, no interprete los resultados de la prueba después de 10 minutos.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Tira de alcohol			Otras tiras		
POS (+)	NEG (-)	INVÁLIDO	NEG (-)	POS (+)	INVÁLIDO
C	T		C	T	



Conmutador: 81 8040.2972

Diinsel S.A. de C.V. | Venezuela 342, Col. Vista Hermosa | Monterrey | 64620