



COVID-19 ANTIBODY

IGG-IGM RAPID TEST DEVICE

Registro Sanitario CAS/DEAPE/13624/2021



Prueba para la detección cualitativa y diferenciación de anticuerpos IgG/IgM contra el virus de SARS-CoV-2 en muestras de suero, plasma o sangre entera humana.


ALMACENAMIENTO

El contenido del kit es estable hasta las fechas de vencimiento marcadas en sus contenedores y embalajes exteriores.

Guarde el dispositivo de prueba rápida COVID-19 IgG/IgM a 2 ~ 30 °C cuando no esté en uso.

No congelar.

MODO DE USO

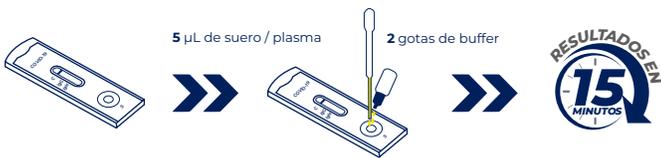

Para muestras de suero o plasma.

Con la pipeta desechable proporcionada, extraiga la muestra hasta la línea de llenado, y posteriormente, deposítela (aproximadamente 5 µL) en el pocillo (S) del dispositivo de prueba. Luego agregue 2 gotas de buffer e inicie el temporizador.



Para muestras de sangre entera venosa.

Con la pipeta desechable proporcionada, deposite la muestra por encima de la línea de llenado (evite que la muestra entre en la burbuja de la pipeta desechable) y transfiera una gota de la muestra al pocillo (S) del dispositivo de prueba. Luego agregue 2 gotas de buffer e inicie el temporizador.

Para sangre por punción en el dedo.


Limpie el lugar de la punción con la gasa de preparación con alcohol proporcionada.

Retire con cuidado la tapa de la lanceta de seguridad.

Empuje la lanceta de seguridad firmemente contra el lugar de la punción hasta que pinche el dedo.




Con la pipeta desechable proporcionada, dibuje la muestra por encima de la línea de llenado (evite que la muestra entre en la burbuja de la pipeta desechable) y transfiera una gota de la muestra al pocillo (S) del dispositivo de prueba. Luego agregue 2 gotas del buffer e inicie el temporizador.

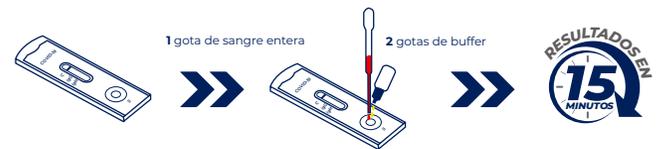

Espera a que la línea azul cambie a la línea roja. Lea los resultados a los 15 minutos.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

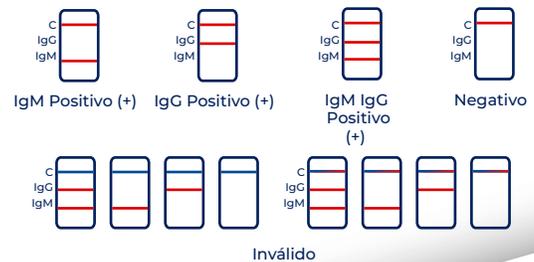

Conmutador: 81 8040.2972