



DENGUE IGG / IGM

RAPID TEST DEVICE

Registro Sanitario No. 1081R2021 SSA



Inmunoensayo cualitativo basado en membrana para la detección de anticuerpos contra el dengue en sangre, suero o plasma. Los antígenos del dengue IgG antihumana y la IgM antihumana se utilizan en la prueba.

ALMACENAMIENTO

El kit debe almacenarse a 2~30 °C hasta la fecha de caducidad impresa en la bolsa sellada.

La prueba debe permanecer en la bolsa sellada hasta su uso.

No congele el kit. Proteja el kit de la humedad.

Se debe tener cuidado para proteger los componentes del kit de la contaminación.

No utilice la prueba si hay evidencia de contaminación microbiana o precipitación. La contaminación biológica de los equipos de dispensación, contenedores o reactivos puede dar lugar a resultados falsos.

MODO DE USO



- 1 Deje que el dispositivo de prueba, la muestra, el buffer y los controles alcancen la temperatura ambiente (15~30 °C) antes de realizar la prueba.

Deje que la bolsa alcance la temperatura ambiente antes de abrirla. Retire el dispositivo de prueba de la bolsa sellada y utilícelo lo antes posible.



Para muestras de suero o plasma.

Con la pipeta desechable proporcionada, extraiga la muestra hasta la línea de llenado y transfírala (aproximadamente 5 µL) al pocillo (S) de la muestra del dispositivo de prueba, luego agregue 2 gotas de buffer e inicie el temporizador.

- 2 Coloque el dispositivo de prueba en una superficie limpia y nivelada y agregue las muestras.
- 3 Observe los resultados en 15 a 20 minutos.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

