



DENGUE NS1 AG

RAPID TEST DEVICE

Registro Sanitario No. 1082R2021 SSA



Inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa del antígeno NS1 del virus del dengue en sangre completa, suero o plasma humanos.

ALMACENAMIENTO


Almacene la prueba a 2~30 °C.

No congelar.


El dispositivo de prueba rápida Dengue NS1 Ag (sangre entera/suero/plasma) es estable durante 24 meses a partir de la fecha de producción cuando se almacena correctamente en bolsas de papel de aluminio con desecante sin abrir.

MODO DE USO

Muestra de suero o plasma

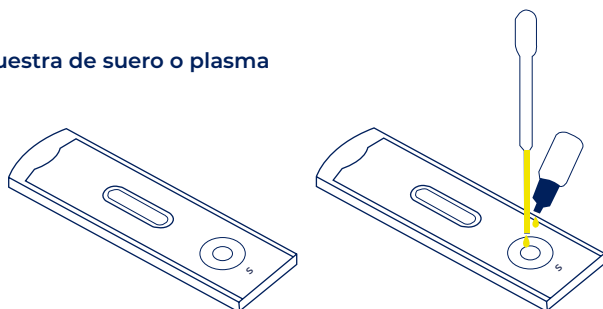

Muestra de sangre entera

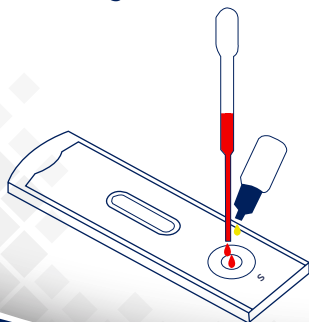

- 1 Deje que la bolsa alcance la temperatura ambiente antes de abrirla. Retire el dispositivo de prueba de la bolsa sellada y utilícelo lo antes posible.
- 2 Coloque el dispositivo de prueba en una superficie limpia y plana.
- 3 Transfiera 1 gota de suero/plasma (aproximadamente 25 µL) al pocillo de la muestra (S) del dispositivo con el gotero provisto, luego agregue 1 gota de buffer e inicie el temporizador. O deje que caigan 2 gotas de sangre entera (aproximadamente 50 µL) en el centro del pocillo (S) del dispositivo de prueba, luego agregue 1 gota de buffer e inicie el temporizador.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS



Conmutador: 81 8040.2972

Diinsel S.A. de C.V. | Venezuela 342, Col. Vista Hermosa | Monterrey | 64620