

# Genrui

## PRUEBA DE ANTÍGENOS

### PRUEBA DE DETECCIÓN COVID-19

Registro Sanitario No. 52026075



El Kit de Prueba de Antígeno Genrui SARS-CoV-2 (Oro Coloidal) es un inmunoensayo de flujo lateral rápido para detectar cualitativamente los antígenos específicos del SARS-CoV-2 en el tracto respiratorio humano. De tal modo, es útil para identificar la infección aguda o temprana del Coronavirus.

## ESPECIFICACIONES

**Muestra:** Hisopo orofaríngeo, Hisopo nasofaríngeo

**Tiempo de prueba:** 15 - 20 minutos

**Almacenamiento:** 2°C~30°C

## MODO DE USO




Hisopo Nasofaríngeo (NP)



Hisopo Orofaríngeo (OP)

### Recolección de la muestra

- 1 Sostenga el hisopo con los dedos colocados en la parte más gruesa del hisopo, con el paciente sentado, inclinar la cabeza 70 grados, apoye la parte posterior de la cabeza con su mano dominante.
- 2 Inserte suavemente el hisopo en la fosa nasal a lo largo del tabique, extendiéndose hacia atrás hasta que alcance la nasofaringe posterior.  
Gire el hisopo varias veces mientras el hisopo está en contacto con la pared nasofaringe.

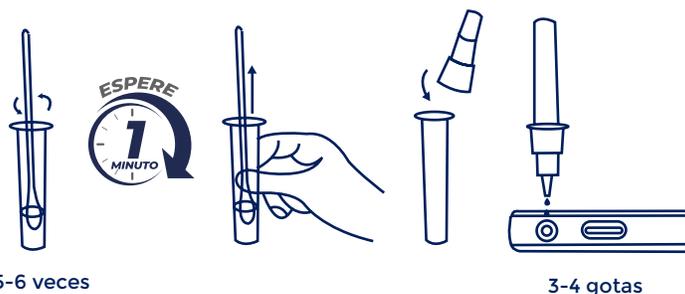

- 3 Gire el hisopo contra el lado del tubo de 5-6 veces y drene la mayor cantidad de líquido posible. Disponga del hisopo correctamente. Aplique la tapa para cerrar el tubo.
- 4 Gire los tubos boca abajo verticalmente y exprima 3-4 gotas en el pozo de muestra.
- 5 Observe los resultados en 15 a 20 minutos.

## INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS



Conmutador: 81 8040.2972