

ALCOMATE PREMIUM

ALCOHOLIMETRO



AlcoMate® Premium (Modelo AL-7000) es un alcoholímetro eficaz y avanzado que proporciona pruebas de alcohol en el aliento de forma exacta y confiable.


No requiere calibración ya que usa la tecnología PRISM™ (Pre-calibrated Replaceable Intelligent Sensor Module). Con el único panel de sensor de fácil reemplazo, toma solo algunos segundos reemplazar el módulo.

ESPECIFICACIONES

Método de medición	Muestra de aliento para determinar %BAC
Rango	0.000% a 0.4000%
Precisión	±0.010% hasta 0.100% BAC
Sensor	Semiconductor óxido
Fuente de energía	Dos baterías AA alcalinas de 1.5V (incluidas)
Capacidad de pruebas	Aprox. 100 a 200 con baterías nuevas
Temperatura de operación	10° ~ 40° C
Tamaño	106 mm x 51 mm x 19 mm
Peso	51 gr (sin baterías)
Módulo de sensor	Deben reemplazarse aproximadamente cada 200-300 pruebas o siempre que resulten dañados con alguna prueba o manejo inadecuado

Si está utilizando el AlcoMate® Premium por primera vez, instale las dos baterías 1.5 V AA (incluidas) e instale la boquilla en la unidad.

MODO DE USO

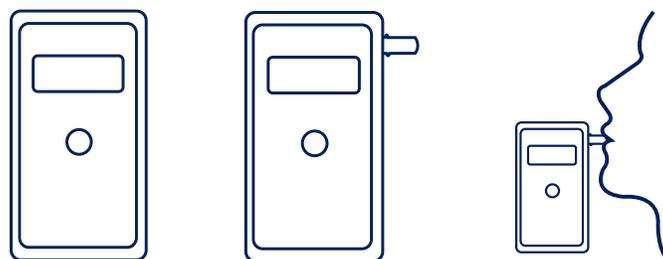

- 1 Mantenga presionado el botón de encendido para activar la unidad. El recuento de las pruebas acumuladas será desplegado, entonces puede dejar de presionar el botón de encendido. La pantalla puede mostrar alternadamente "Nor", que es una abreviación para operación "Normal".
- 2 Suelte el botón de encendido. Entonces contará regresivamente hasta que la unidad esté lista. La pantalla desplegará "Blow" (sople), cuando esté listo.
- 3 Indique a la persona que coloque los labios alrededor de la boquilla, sople fuerte e ininterrumpidamente dentro de la unidad, alrededor de 4 segundos. Si aparece "Flow" en la pantalla, la muestra de aliento no fue fuerte o suficientemente larga para medirse. Intente de nuevo. Si el dispositivo no puede tomar una muestra exitosa, aparecerá "Out" en la pantalla y la unidad se apagará sola.
- 4 Al momento en que se termine el análisis, verá que en la pantalla aparecen los resultados de concentración de alcohol en la sangre (BAC). El resultado de la prueba será mostrado alrededor de 15 segundos. Después de esto la unidad se apagará por sí sola.

