

PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DEL ANTÍGENO DE GONORREA

Registro Sanitario No. 1389R2018 SSA




La prueba rápida de Gonorrea en Cassette (hisopado) es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de *Neisseria gonorrhoeae* en muestras de hisopados cervicales femeninos e hisopados uretrales masculinos, para ayudar en el diagnóstico de infección por Gonorrea.

ALMACENAMIENTO

Almacene tal y como se empacó el sobre sellado, ya sea a temperatura ambiente o en refrigeración (2-30°C).

La prueba es estable hasta la fecha de vencimiento impresa en el sobre sellado. La prueba debe permanecer en el sobre sellado hasta su uso. NO DEBE CONGELARSE. No utilizarse después de la fecha de vencimiento.

MODO DE USO

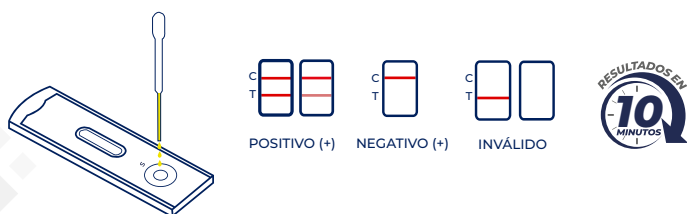

Permita que la prueba, la muestra de orina y/o los controles se encuentren a temperatura ambiente (15-30°) antes de realizar la prueba.

- 1 Retire el cassette de prueba del sobre sellado y utilícelo tan pronto sea posible, ya que se obtienen mejores resultados si la prueba se lleva a cabo inmediatamente después de abrir el sobre de aluminio.

- 2 Extraiga el antígeno Gonorrea de acuerdo al tipo de muestra.
 - Sostenga de manera vertical la botella del reactivo 1, el cual es incoloro, y agregue 5 gotas del reactivo 1 (aprox. 300ul) al tubo de extracción. De inmediato inserte el hisopo, presione hacia el fondo del tubo y gírelo 15 veces. Deje reposar durante 2 minutos.
 - Sostenga la botella del reactivo 2 de manera vertical y agregue 4 gotas del reactivo 2 (aprox. 200ul) al tubo de extracción. La solución se volverá turbia. Presione hacia el fondo del tubo y gire el hisopo 15 veces hasta que la solución se vuelva transparente con un leve color verde o azul. Si el hisopo presenta sangre, el color se volverá amarillo o café. Deje reposar durante 1 minuto.
 - Presione el hisopo contra un lado de la pared del tubo y retire el hisopo mientras aprieta el tubo. Mantenga tanto líquido en el tubo como sea posible. Coloque la punta del gotero sobre el tubo de extracción.

- 3 Coloque el cassette de prueba en una superficie limpia y nivelada. Agregue 3 gotas de la solución que se extrajo (aprox. 100 ul) en el pocillo de muestra del cassette e inicie el temporizador. Evite las burbujas de aire en pocillo de muestra.
- 4 Espere a que aparezca el color. Interprete los resultados a los 10 minutos; no interprete los resultados después de 30 minutos.

EL KIT INCLUYE:

Tubos de extracción.
Reactivo de extracción
Hisopos cervicales femeninos estériles
Puntas de gotero



Conmutador: 81 8040.2972

Diinsel S.A. de C.V. | Venezuela 342, Col. Vista Hermosa | Monterrey | 64620