



TIRAS REACTIVAS DE PRUEBA RÁPIDA PARA DETECCIÓN DE LA GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA

Registro Sanitario No. 1088R2021 SSA



La tira de prueba rápida de hCG (orina) es un inmunoensayo visual rápido para la detección cualitativa de gonadotropina coriónica humana en muestras de orina humana. Diseñado para usarse como ayuda en la detección temprana del embarazo.


ALMACENAMIENTO

El kit debe almacenarse a 2~30 °C hasta la fecha de caducidad impresa en la bolsa sellada.

La prueba debe permanecer en la bolsa sellada hasta su uso.

No congelar.

MODO DE USO

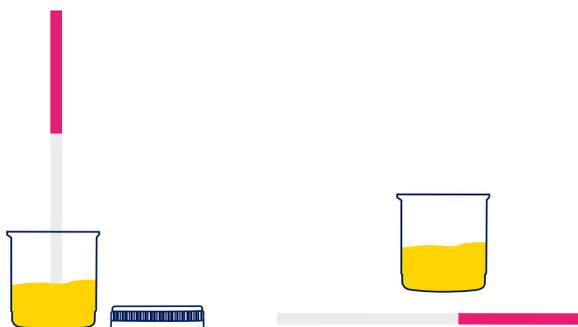

- 1 Lleve las pruebas, las muestras o los controles a temperatura ambiente (15-30 °C) antes de su uso. Saque la prueba de su bolsa sellada y úsela lo antes posible. Para obtener los mejores resultados, el ensayo debe realizarse dentro de una hora. Sostenga la tira por el extremo, donde está impreso el nombre del producto. Para evitar la contaminación, no toque la membrana de la tira.
- 2 Sosteniendo la tira verticalmente, sumerja la tira reactiva en la muestra de orina durante al menos 10-15 segundos. No sumerja más allá de la línea máxima (MAX) en la tira reactiva. A medida que la prueba comience a funcionar, el color migrará a través de la membrana.
- 3 Una vez finalizada la prueba, retire la tira de la muestra y colóquela sobre una superficie plana no absorbente. Inicie el temporizador y espere a que aparezcan las bandas de colores. El resultado debe leerse a los 3 minutos. No interprete el resultado después de 10 minutos.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

