

PRUEBA DE EMBARAZO DE HCG

Registro Sanitario No. 1984R2023 SSA

Presentación Farmacia



La prueba de embarazo de hCG Midstream es un inmunoensayo cualitativo rápido y autoejecutable para la determinación de gonadotropina coriónica humana (hCG) en muestras de orina a 10 mUI/ml o más. Este kit está diseñado para usarse como ayuda en la detección temprana del embarazo.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

El kit debe almacenarse a 2-30 °C hasta la fecha de caducidad impresa en la bolsa sellada.

La prueba debe permanecer en la bolsa sellada hasta su uso. No congelar.

Se debe tener cuidado de proteger los componentes del kit de la contaminación.

MODO DE USO



- 1 Saque la prueba de su bolsa sellada. Quite la tapa protectora.
- 2 Sostenga el bastón por el mango y mantenga la punta de la prueba con la punta hacia abajo, en el chorro de orina durante al menos 10 segundos hasta que esté completamente mojada.

Alternativamente, recolecte la orina en un recipiente limpio y seco, y sumerja la punta de la prueba en la orina durante al menos 10 segundos.

Nota: No orine sobre la región de la banda de prueba (T) o la región de la banda de control (C).

- 3 Coloque la tapa protectora sobre la punta y coloque la prueba en una superficie nivelada, y luego comience a cronometrar. Espere a que aparezcan las bandas de colores.
- 4 Interprete el resultado a los 3 minutos. Si no aparece una línea roja, espere 1 minuto más. Se pueden observar algunos resultados positivos en 1 minuto o menos dependiendo de la concentración de hCG. No lea el resultado después de 10 minutos.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

