



PRUEBA DE EMBARAZO DIGITAL (HCG)



Inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa y presuntiva de gonadotropina coriónica humana (hCG) en muestras de orina. Este kit está diseñado para usarse como ayuda en la detección temprana del embarazo. Dispositivo autónomo. Mayor precisión en los resultados. Realice la prueba donde lo requiera.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD


El kit debe conservarse a 2-30 °C alejado de la luz directa hasta la fecha de caducidad impresa en la bolsa sellada.

La prueba debe permanecer en el sobre sellado hasta el momento de su uso.

No congelar.

Se debe tener cuidado de proteger los componentes del kit de cualquier contaminación.

MODO DE USO

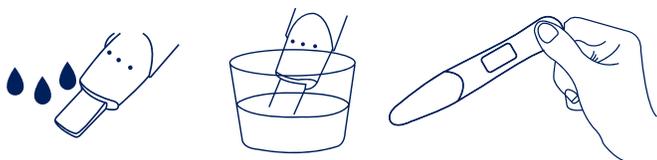


- 1 La muestra de orina debe ser recolectada en un contenedor de plástico o vidrio limpio y seco. Se prefiere la primera orina de la mañana, ya que generalmente contiene una concentración más alta de hCG.
- 2 Lea cuidadosamente el inserto del paquete antes de realizar la prueba. Retire el dispositivo de prueba del sobre sellado y verifique la pantalla en busca de la presencia de un símbolo de reloj despertador.

Nota: No utilizar la prueba a menos que el símbolo de reloj despertador esté en la pantalla. Utilizar el dispositivo inmediatamente después de desempacar.

- 3 Coloque el lector en posición paralela sobre el escritorio con la pantalla hacia arriba. Después de aprox. 40 segundos, se mostrará un reloj despertador intermitente en la pantalla LCD, lo que significa que la tira reactiva ha entrado en la etapa de reacción. La alarma parpadeará durante 3 minutos, y luego los resultados de la prueba se mostrarán en la pantalla. Consulte la interpretación de resultados de la prueba.
- 4 Este dispositivo contiene dos baterías con una función de extracción en el lado opuesto del agarre para el pulgar. Cuando la prueba haya terminado, desmóntelo como se muestra en la imagen.

Saque las baterías. El dispositivo de prueba debe desecharse. Asegúrese de desechar las baterías de acuerdo con las regulaciones locales.

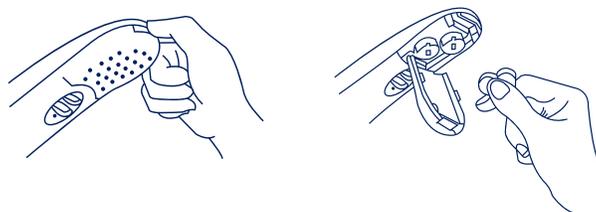

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

- SI 1-2** El estado débilmente positivo del artículo de prueba indica que el embarazo se confirma dentro de 1-2 semanas.
- SI 2-3** El estado positivo moderado en el artículo de prueba indica que el embarazo puede estar dentro de 2-3 semanas.
- SI 3+** El estado fuertemente positivo de los elementos de prueba indica que se tiene 3 semanas o más de embarazo.
- NO** El estado negativo del artículo de prueba, indica que no hay embarazo. Se recomienda realizar otra prueba dentro de 3 días.

Nota: Cualquier error en el proceso de prueba se evaluará con el símbolo "?"

