

## ACCUCHEK ACTIVE GLUCÓMETRO



Accu-chek Active® es el medidor para la determinación cuantitativa de valores de glucemia de sangre capilar fresca. El medidor puede ser utilizado por personas con diabetes para el autocontrol de los valores de glucosa en sangre. Asimismo, puede ser utilizado por el personal médico para realizar pruebas de glucemia en diferentes pacientes.

### CARACTERÍSTICAS

Accu-Chek® Active ahora dispone de:

Mediciones fáciles y precisas que le ayudan a obtener resultados exactos en poco tiempo.


Múltiples características de seguridad que garantizan unos resultados precisos a la primera.

Vanguardistas herramientas de control de la diabetes para ayudarlo a mantenerse al día.

Nuevo diseño ergonómico para una utilización más sencilla y discreta.

Compatible con otras herramientas de Accu-Chek.

### MODO DE USO

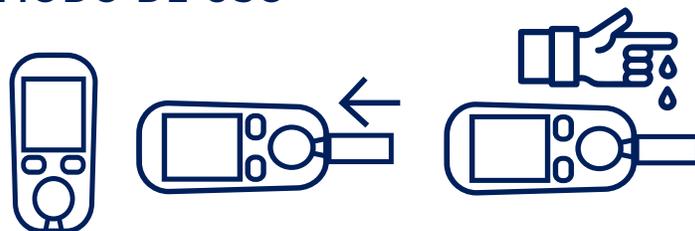

- 1 Prepare el dispositivo de punción para la obtención de sangre. Pinche con el dispositivo de punción un lado de la yema del dedo.
- 2 Aplique la gota de sangre en el centro de la zona de color verde. Después retire el dedo de la tira reactiva.
- 3 La medición termina en 5 minutos. En la pantalla aparece el resultado de glucemia y se oye una señal acústica. Al mismo tiempo, el medidor guarda el resultado en la memoria.