


ACCU-CHEK INSTANT

GLUCÓMETRO



Dispositivo para realizar mediciones cuantitativas de glucemia en sangre capilar total fresca y monitorear datos. No necesita configuración y su uso, con un solo botón, es realmente sencillo: solo inserte una tira, coloque la muestra de sangre y verifique su resultado.

CARACTERÍSTICAS

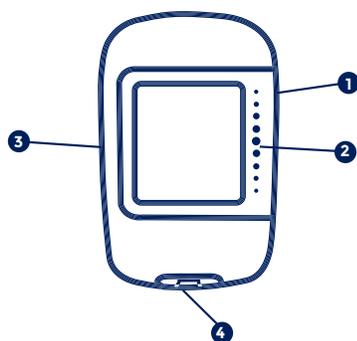

1 Tecla del medidor

Púlsela para encender y apagar el medidor, desplazarse hasta la pantalla siguiente o hacer una selección.

2 Indicador del intervalo lineal

Indica si el resultado de glucemia está por encima, por debajo o dentro de un intervalo de valores predeterminado.


3 Puerto micro USB

Se usa para transferir datos del medidor a un ordenador (PC).

4 Ranura de la tira reactiva

Inserte la tira reactiva en este lugar.

MODO DE USO

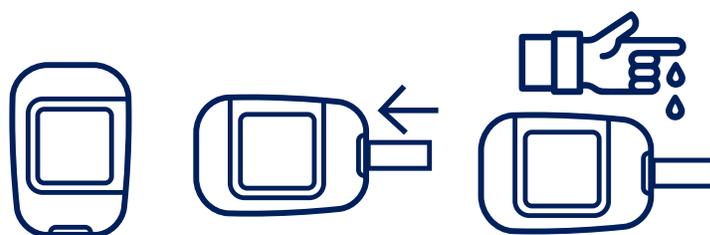

- 1 Antes de realizar la prueba, lave sus manos. Compruebe la fecha de caducidad del tubo de tiras reactivas. Inserte el extremo metálico de la tira reactiva en el medidor. El medidor se encenderá.
- 2 Cuando aparezca el símbolo de una gota parpadeando, efectúe una punción en la yema del dedo con el dispositivo de punción. Roce el borde amarillo de la tira reactiva con la gota de sangre. Retire el dedo de la tira reactiva cuando aparezca el símbolo de un reloj de arena parpadeando.
- 3 El resultado de glucemia aparece junto con una flecha. La flecha indica si el resultado de medición está por encima, por debajo o dentro del intervalo ideal.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS


Azul
El resultado de medición está por encima del intervalo ideal.


Verde
El resultado de medición está dentro del intervalo ideal.


Rojo
El resultado de medición está por debajo del intervalo ideal.