


ACCUTREND PLUS GLUCÓMETRO




Accutrend Plus® es un dispositivo flexible y portátil que permite analizar los tres parámetros clave: colesterol total, triglicéridos y glucosa. Un dispositivo rentable y multiuso que proporciona una excelente eficacia analítica en comparación con los análisis estándares de laboratorio. Además, permite almacenar hasta 100 mediciones diferentes con fecha, hora y marcas de valor alto o bajo.

TIRA REACTIVA

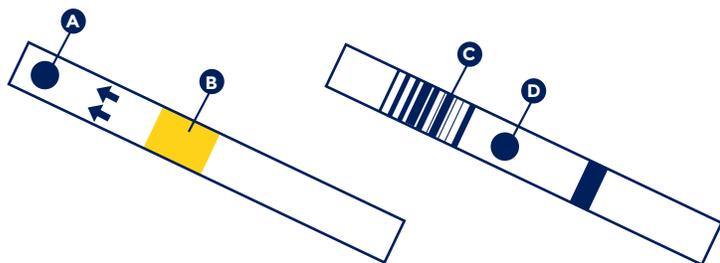

- A Tira reactiva (Cara superior, tg en ejemplo)**
Contiene el área de aplicación.
- B Área de aplicación**
Aplique aquí la muestra.
- C Tira reactiva (Cara inferior)**
El código de barras impreso se utiliza para identificar el tipo y el lote de la tira reactiva.
- D Área de reacción**
Se utiliza para comprobar visualmente si se ha aplicado la sangre correctamente.

MODO DE USO

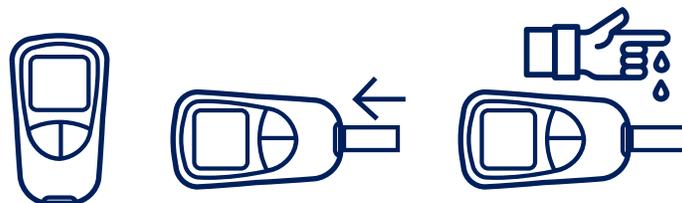

- 1** Antes de realizar la prueba, lave sus manos. Encienda el dispositivo e introduzca una tira reactiva. Una flecha parpadeante le indicará que abra el dispositivo para aplicar la muestra de sangre.
- 2** Utilice el dispositivo de punción para obtener una muestra de sangre capilar y aplíquela directamente a la tira (también puede aplicar la muestra de sangre en la tira reactiva fuera del instrumento y después volver a introducirla).
- 3** Cierre la tapa y espere los resultados. Una vez finalizada la medición, aparecerán los valores en pantalla y, en su caso, una marca de valor alto o bajo.

