



PRUEBA RÁPIDA PARA ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO

Registro Sanitario No. 1080R2021 SSA



Prueba rápida de PSA, para la detección cualitativa de antígeno prostático específico en sangre entera, suero o plasma humano. Este kit está diseñado para usarse como auxiliar en el diagnóstico del cáncer de próstata.


ALMACENAMIENTO

El kit debe almacenarse a 2~30 °C hasta la fecha de caducidad impresa en la bolsa sellada.

La prueba debe permanecer en la bolsa sellada hasta su uso.

No congelar.

MODO DE USO

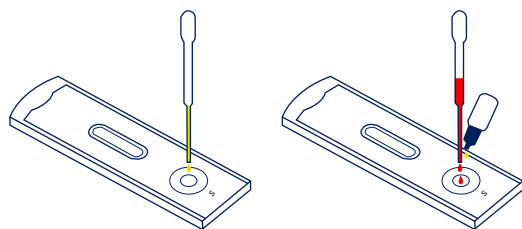

- 1 Saque la prueba de su bolsa sellada y colóquela en una superficie limpia y nivelada. Etiquete el dispositivo con la identificación del paciente o del control.
- 2 Coloque el dispositivo de prueba sobre una superficie limpia y nivelada.

Para muestras de sangre entera

Transfiera 2 gotas de sangre entera al pocillo de la muestra (S) del dispositivo con la pipeta desechable provista, luego agregue 1 gota de buffer e inicie el temporizador.

O deje que 1 gota colgante de sangre entera por punción digital caiga en el centro del pocillo de la muestra (S) del dispositivo de prueba, luego agregue 1 gota de buffer y encienda el temporizador. Evite atrapar burbujas de aire en el pocillo de la muestra (S) y no agregue ninguna solución al área de resultados.


A medida que la prueba comienza a funcionar, el color migrará a través de la membrana.

Para muestras de suero o plasma

Transfiera 1 gota de suero/plasma al pocillo de la muestra (S) del dispositivo con la pipeta desechable proporcionada, luego agregue 1 gota de buffer e inicie el temporizador.

- 3 Espere a que aparezcan las bandas de colores. El resultado debe leerse a los 10 minutos. No interprete el resultado después de 20 minutos.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

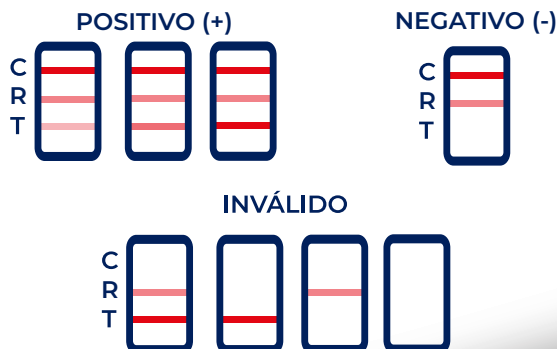

Conmutador: 81 8040.2972

Diinsel S.A. de C.V. | Venezuela 342, Col. Vista Hermosa | Monterrey | 64620