



PRUEBA RÁPIDA PARA DETECCIÓN DE TROPONINA CARDÍACA EN SANGRE

Registro Sanitario No. 1107R2021 SSA



Inmunoanálisis cualitativo rápido para la detección de la troponina I cardíaca en muestras de sangre completa, suero o plasma de seres humanos. Este kit está diseñado para utilizarse como un apoyo en el diagnóstico del infarto al miocardio (MI)

Es una prueba de detección y todos los resultados positivos deben confirmarse con una prueba alternativa.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD


Almacene la prueba a 2~30 °C.

No congelar.

El dispositivo de prueba rápida de Troponina I Cardíaca (sangre entera/suero/plasma) es estable durante 24 meses a partir de la fecha de producción cuando se almacena correctamente en bolsas de papel de aluminio con desecante sin abrir.

Se debe tener cuidado de proteger los componentes del kit de la contaminación.

MODO DE USO:

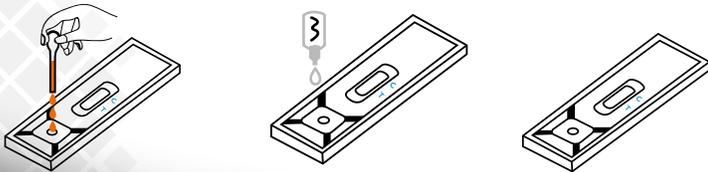


SOSTENGO EL GOTERO

Sostenga el gotero en posición vertical y transfiera 2 gotas de sustancia de control (aproximadamente 50 µL) al pocillo de la muestra (S) del dispositivo de prueba e inicie el temporizador.

LEA LOS RESULTADOS

Espere a que aparezcan las líneas de color. Lea los resultados a los 10 minutos. No interprete los resultados después de 20 minutos.

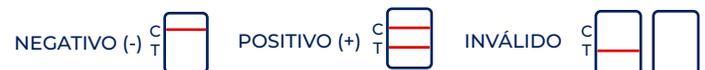

Conmutador: 81 8040.2972

Diinsel S.A. de C.V. | Venezuela 342, Col. Vista Hermosa | Monterrey | 64620